


Bezpečnostní doporučení


- Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Maximální nosnost 150 kg.
- Během přesunů klienta z a na zařízení se ujistěte, že je křeslo zabrzděné.
- Položte obě nohy na opěrky nohou.
- Přední zapínání je při pohybu nahoru/dolů zavřené a paže by měly spočívat na loketní opěrce.
- Křeslo přemísťujte a posouvejte pouze v dolní poloze.

Ovládání

Nahoru

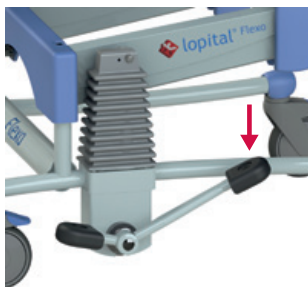

Dolů

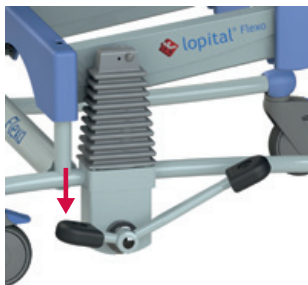

Důležité!

Tuto instruktážní kartu nelze považovat za náhradu za návod k použití.




Použití

1. Umístěte židli do správné polohy a vyklepte podnožky nahoru.
2. Zabrzděte židli!
3. Otevřete loketní opěrky a v případě potřeby je vyklepte nahoru.
4. Podepřete méně zdatnou osobu, když si sedá.
5. Zavřete loketní opěrky a nechte nohy klienta spočívat na opěrkách nohou.

Postavení provedete stejným postupem v opačném pořadí.

Blokování kol

1. Blokování kol.
2. Odemčení.

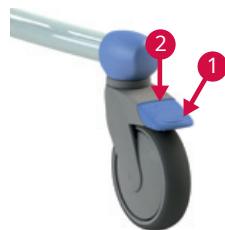


Opěrka nohou



Aby se osoba s omezenou pohyblivostí mohla posadit na židli, musí být obě podnožky sklopeny. Za tímto účelem sklopte podnožky (1) nebo vyklepte obě podpěry (2). Ujistěte se, že osoba s omezenou pohyblivostí má při pohybu obě nohy na podnožkách.

Loketní opěrka s předním zapínáním

1. Odemknutí.
2. Otáčení.
3. Skládání nahoru.

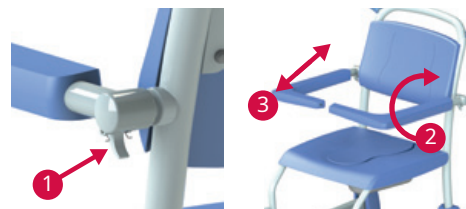

Funkce toalety

- Než si osoba do židle posadí, odstraňte víko ze sedadla.
- *V kombinaci s toaletou:* Flexo lze přesouvat téměř nad každou toaletu. Posuňte křeslo nahoru nebo dolů pro dosažení správné polohy.
- *S podložní mísou:* Flexo lze také použít jako toaletní křeslo. Jednoduše zasuňte nerezovou/plastovou podložní mísu pod křeslo pomocí vodiček.

Čištění a údržba

Flexo je nutné po každém použití čistit vodou a běžnými čisticími prostředky pro domácnost. Nepoužívejte žádné abrazivní ani jiné agresivní čisticí prostředky. Pravidelně kontrolujte kolečka, zda na nich nejsou chlupy, prach a zbytky mýdla, a v případě potřeby je odstraňte.

Úplný plán údržby naleznete v návodu k použití.

V případě poruchy kontaktujte výhradního distributora pro ČR firmu Pro CleanLife s.r.o. Tel: +420 608 837 006, E-mail: info@cleanlife.cz

Návod k použití
Úplný návod k použití naleznete na www.cleanlifeshop.cz.